

	INSTRUCCION DE TRABAJO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	Código: IT-CH-CC-03
		Página 1 de 3 Fecha de Revisión: Agosto 2019 Versión vigente: 01
División de Servicios Generales		

INDICE	Pág.
1. ALCANCE.....	1
2. DOCUMENTOS APLICABLES.....	1
3. DEFINICIONES.....	1
4. MATERIAL Y EQUIPO	2
5. DESARROLLO.....	2
6. ANEXOS.....	2
7. CONTROL DE CAMBIOS.....	3

1. Alcance:

Aplica en todas las actividades **del** Proceso de limpieza y sanitización de camillas y sillas de ruedas que se realizan dentro de la institución incluyendo áreas blancas.

2. Documentos Aplicables:

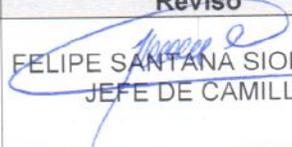
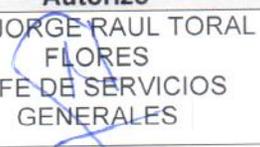
NOM-045-SSAZ-2005
Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones Nosocomiales
En el párrafo 10.6.7.2

3. Definiciones:

Área Blanca: Área considerada estéril donde se utiliza uniforme quirúrgico.

Limpieza: es la remoción mecánica por medio del agua y un detergente de toda materia extraña, de las superficies en general. No elimina los microorganismos pero reduce su número.

Sanitización: Proceso de limpieza a base de productos químicos que reduce el número de microorganismos hasta un nivel seguro.

	Elaboró	Revisó	Autorizó
COPIA NO CONTROLADA	GABRIEL ALEJANDRO HERNANDEZ VERA SUPERVISOR DE CAMILLERIA	 FELIPE SANTANA SIORDIA JEFE DE CAMILLERIA	 ING JORGE RAUL TORAL FLORES JEFE DE SERVICIOS GENERALES

	INSTRUCCION DE TRABAJO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	Código: IT-CH-CC-03
		Página 2 de 5 Fecha de Revisión: Agosto 2019 Versión vigente: 01
División de Servicios Generales		

Técnicas de Limpieza.

Tipos de limpieza: Rutinaria: Es aquella que se realiza en forma diaria o entre paciente y paciente.

Áreas de limpieza: Central de Camillería, Resonancia, Tomografía de Torre y Área Antigua, Geriatria, Endoscopias, Quirófanos Primer Piso Torre, Ginecología, Urología, Oftalmología, Urología y Maternidad.

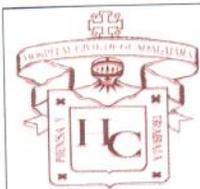
Germicida: Sustancia para fulminar bacterias, hongos, esporas, tripanosomas y mico bacterias, gérmenes (bacterias, virus u otros microbios que pueden causar infecciones o enfermedades).

Éviter: Libre de Glutaraldehido

4.- Material y Equipo:

<ul style="list-style-type: none"> -Camillas -Guantes desechables -Cubre-bocas -Batas desechables -Goggles 	<ul style="list-style-type: none"> -Jabón en polvo -Solución desinfectante (Éviter) para superficies (camillas y sillas de ruedas)
---	---

COPIA NO CONTROLADA



INSTRUCCION DE TRABAJO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS

Código: IT-CH-CC-03

Página 3 de 5

Fecha de Revisión:
Agosto 2019

Versión vigente: 01

División de Servicios Generales

5. Desarrollo:

No.	Responsables	Descripción de la Actividad
5.1	camillero	Para obtener una esterilización adecuada, Después de cada traslado se limpia la camilla y o silla de ruedas con un atomizador preparado con solución éviter para fulminar bacterias, hongos, esporas, tripanosomas y mico bacterias.
5.2	camillero	Inicia con el Colchón para camilla, iniciando de la parte más limpia hacia la más sucia por ambos lados para evitar así la proliferación de micro organismos , quite el colchón y recárguelo sobre uno de los lados de la camilla
5.3	camillero	Continuar en el mismo orden sobre la superficie de la camilla empezando por levantar el respaldo por ambos lados .
5.4	camillero	Continuar de arriba hacia abajo, Porta suero, Barandales, Base de almacenamiento y soporte para el tanque de oxígeno, Poste Hidráulico, Pedales Por último limpie las llantas.
5.5	camillero	Enjuagar y exprima la franela en la cubeta con agua tantas veces sean necesarias.
5.6	camillero	Posteriormente realizar el mismo procedimiento con solución desinfectante y dejar actuar 10 minutos.
5.7	camillero	Ya para terminar se seca la camilla con franela
5.8	camillero	Lavarse las manos al terminar con agua y jabón para evitar alguna infección.
5.9	camillero	Limpiar la silla de ruedas inicia de la parte más limpia hacia la más sucia por ambos lados remojando con solución éviter un aproximado de 10 minutos,
5.10	camillero	Se inicia con la superficie del respaldo continuamos con él asiento, reposabrazos, reposapiés, Mango de empuje, Aro propulsor y por último las Ruedas traseras y delanteras.
5.11	camillero	Ya para terminar se seca la camilla con franela
5.12	camillero	Al término de la labor limpie y guarde los utensilios.

COPIA NO CONTROLADA



INSTRUCCION DE TRABAJO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS

Código: IT-CH-CC-03

Página 4 de 5

Fecha de Revisión:
Agosto 2019

Versión vigente: 01

División de Servicios Generales

Camilla



Sillas de Ruedas



COPIA NO CONTROLADA

	INSTRUCCION DE TRABAJO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	Código: IT-CH-CC-03
		Página 5 de 5 Fecha de Revisión: Agosto 2019 Versión vigente: 01
División de Servicios Generales		

6. Anexos

N/A

7. Control de Cambios:

Versión Vigente	Fecha	Motivo
00	Diciembre 2017	Alta del documento
01	Agosto 2019	Mejoras al procedimiento

COPIA NO CONTROLADA