

	INSTRUCCION DE TRABAJO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE CAMILLAS Y AMBULANCIA DE TRANSPORTES FAA	Código: IT-CH-TR-02
		Página 1 de 3
	División de Servicios Generales	Fecha de Revisión: Agosto 2019
		Versión vigente: 00

INDICE	Pág.
1. ALCANCE.....	1
2. DOCUMENTOS APLICABLES.....	1
3. DEFINICIONES.....	1
4. MATERIAL Y EQUIPO	1
5. DESARROLLO.....	2
6. CONTROL DE CAMBIOS.....	3

1. Alcance:

Aplica en todas las actividades Proceso de limpieza y sanitización de camillas y de Ambulancias que se realizan dentro de la institución.

2. Documentos Aplicables:

Manual de técnicas de limpieza de Transportes.

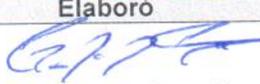
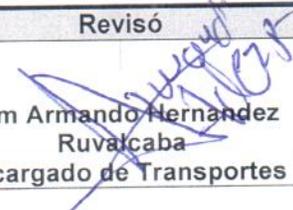
3. Definiciones:

Limpieza: Es la remoción mecánica por medio del agua y un detergente de toda materia extraña, de las superficies en general. No elimina los microorganismos pero reduce su número.

Sanitización: Proceso de limpieza a base de productos químicos que reduce el número de microorganismos hasta un nivel seguro.

4.- Material y Equipo:

-Camillas -Guantes desechables -Cubre-bocas	-Cloro -Jabón en polvo -Solución desinfectante para superficies (camillas y ambulancias)
---	--

	Elaboró	Revisó	Autorizó
COPIA NO CONTROLADA	 Tum Aldo Noel González Huerta Secretaria de Transportes	 Tum Armando Hernández Ruvalcaba Encargado de Transportes	 Ing Jorge Raúl Toral Flores Jefe de Servicios Generales

	INSTRUCCION DE TRABAJO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE CAMILLAS Y AMBULANCIAS TRANSPORTES FAA	Código: IT-CH-TR-02
		Página 2 de 3
	División de Servicios Generales	Fecha de Revisión: Agosto 2019
		Versión vigente: 00

5. Desarrollo:		
No.	Responsables	Descripción de la Actividad
5.1	Chofer de Ambulancia /Camillero	Para obtener una esterilización adecuada, Después de cada traslado se limpia la camilla con un atomizador preparado con solución evitar para fulminar bacterias, hongos, esporas, tripanosomas y mico bacterias.
5.2	Chofer de Ambulancia /Camillero	Colchón para camilla, iniciando de la parte más limpia hacia la más sucia.
5.3	Chofer de Ambulancia /Camillero	Continuar en el mismo orden sobre la superficie de la camilla y ambulancia empezando por levantar el respaldo y empezar por esa parte y después la otra mitad.
5.4	Chofer de Ambulancia /Camillero	Continuar de arriba hacia abajo, sacudiendo todas las partes de la primera mitad de la camilla y ambulancia y después la otra mitad.
5.5	Chofer de Ambulancia /Camillero	Enjuagar y exprima la franela en la cubeta con agua tantas veces sean necesarias.
5.6	Chofer de Ambulancia /Camillero	Posteriormente realizar el mismo procedimiento con solución desinfectante y dejar actuar 10 minutos.
5,7	Chofer de Ambulancia /Camillero	Retirar la solución desinfectante con agua, Por último limpie las ruedas de camilla y ambulancia.
5.8	Chofer de Ambulancia /Camillero	Ya para terminar se seca la camilla y ambulancia con franela
5.9	Chofer de Ambulancia /Camillero	Lavarse las manos al terminar con agua y jabón para evitar alguna infección.
5.10	Chofer de Ambulancia /Camillero	Al terminar de su labor guarde los utensilios.

COPIA NO CONTROLADA

	INSTRUCCION DE TRABAJO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE CAMILLAS Y AMBULANCIAS TRANSPORTES FAA	Código: IT-CH-TR-02
		Página 3 de 3
	División de Servicios Generales	Fecha de Revisión: Agosto 2019
		Versión vigente: 00

6. Control de Cambios:

Versión Vigente	Fecha	Motivo
00	Agosto 2019	Alta del documento

COPIA NO CONTROLADA